

Wissen wie's geht – optimale Hygiene und Pflege



Aufbereitung von W&H Med Hand-/Winkelstücken und Motoren

Hinweise zur Aufbereitung

Diese Hygiene- und Pflegeempfehlungen gelten insbesondere für W&H Med Übertragungsinstrumente und Motoren.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Übertragungsinstrumente und Motoren sind für die Sterilisation zugelassen.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Übertragungsinstrumente und Motoren können im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) thermisch gereinigt und desinfiziert werden.

Allgemeine Hinweise

- Reinigen und desinfizieren Sie das Hand-/Winkelstück sofort nach jeder Behandlung.
- Für W&H Med Übertragungsinstrumente und Chirurgie Motoren zertifizierte, geprüfte Desinfektionsmittel verwenden und die entsprechende Dosierung und Einwirkzeit beachten. Das verwendete Desinfektionsmittel darf kein Chlor enthalten.
- Detaillierte Angaben in der Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.
- Benutzung von Schutzkleidung (reißfeste Handschuhe, Brille, evtl. Mundschutz) wird empfohlen.
- Saubere, trockene Antriebsluft verwenden.
- W&H empfiehlt die Verwendung von demineralisiertem Wasser.
- Bitte beachten Sie die detaillierten Informationen unter med.wh.com


1

Ausgangssituation



2

Vorbereiten

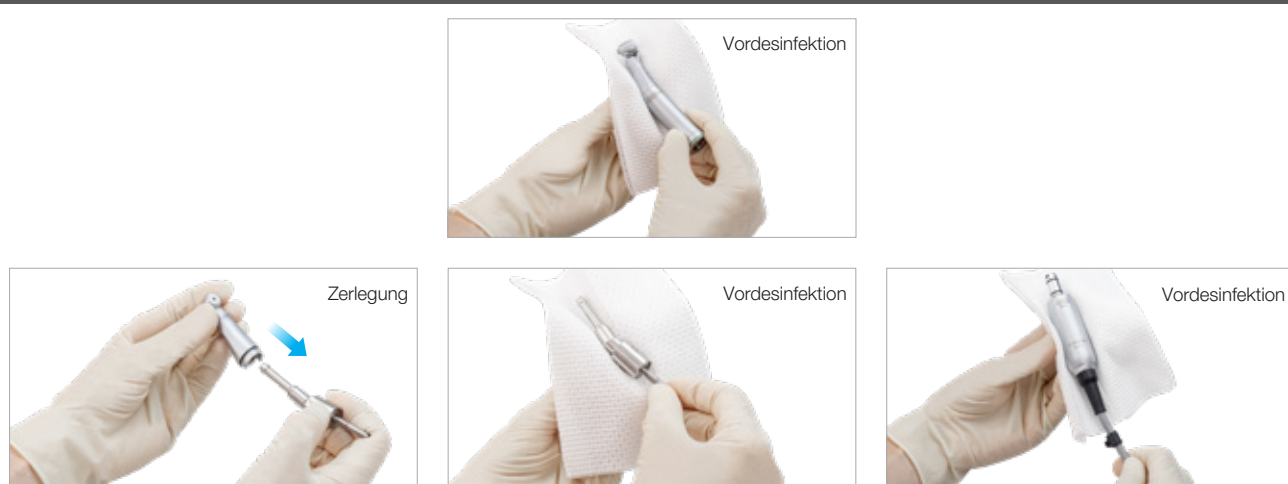

3

Reinigen / Trocknen

Manuell




Automatisch




4

Desinfizieren / Trocknen

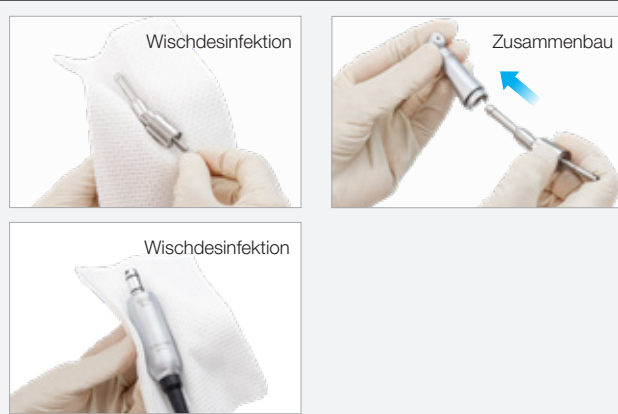

5

Inspektion und Ölpflege

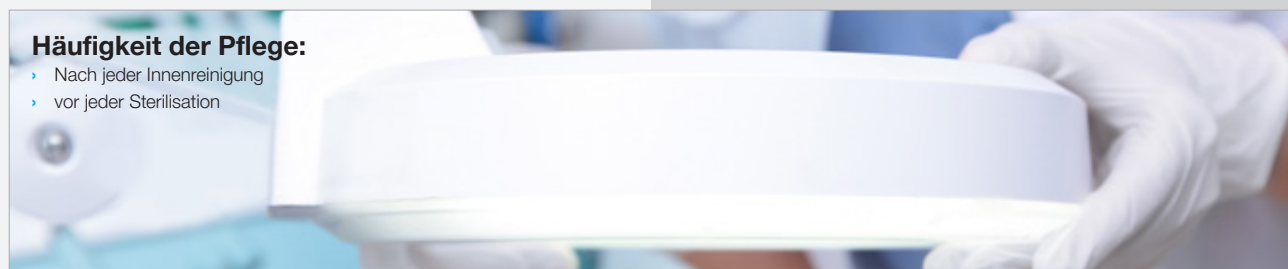

Manuell



Maschinell



6

Verpacken / Sterilisieren

7

Verpackung

- Ein Verpackungssystem muss aus einer sterilen Barriere und einer Schutzverpackung bestehen.
- Verwenden Sie ausschließlich Verpackungssysteme und Verfahren, die den geltenden Qualitäts- und Verpackungsformen entsprechen und für das gewählte Sterilisationsverfahren geeignet sind.
- Sterilisationsverpackungen müssen für das Sterilgut groß genug sein und dürfen nicht unter Spannung stehen.
- Beutel und sonstige Verpackungsmaterialien dürfen nicht wiederverwendet werden.

Sterilisation

- Sterilisation dient zur Eliminierung aller lebenden Mikroorganismen einschließlich Sporen. Der zulässige Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) für ein sterilisiertes Produkt liegt bei eins zu einer Million (SAL 10⁻⁶).
- Typ B:** Medizinische Sterilisation = geeignet für Beladungen aller Art
 - Typ S:** Für spezifische Produkte gemäß Angaben des Herstellers

Sterilisationszeit mindestens 5 Minuten bei 134°C oder mindestens 18 Minuten bei 121°C.



8

Lagerung

Lagern Sie das Sterilgut staubfrei und trocken. Die Haltbarkeit des Sterilguts ist abhängig von den Lagerbedingungen und Art der Verpackung.

Nähere Information unter med.wh.com/de_global/medizin-produkte/sterilisation

Vertrieb:

W&H Dentalwerk
 Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53,
 Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 med.wh.com

W&H Sterilization Srl.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), **Italy**
 t +39 035-66 63 000
 f +39 035-50 96 988
 office.sterilization@wh.com
 med.wh.com

W&H Deutschland GmbH
 Ludwigstraße 27
 83435 Bad Reichenhall,
Deutschland
 t +49 8651 904 244-0
 f +49 8651 904 244-4
 office.de@wh.com
 med.wh.com

W&H Austria GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-239
 f +43 6274 6236-890
 office.at@wh.com
 med.wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 med.wh.com